


Bedienungsanleitung

BASIC by buchner® Universalspender

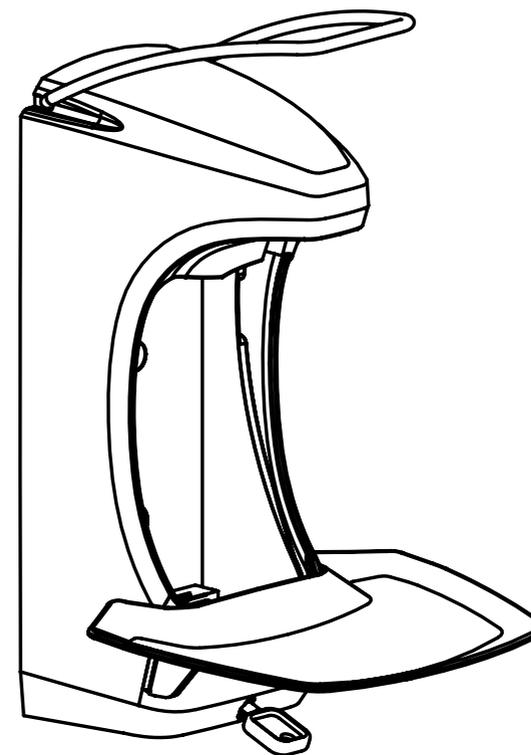

! Wichtig!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

12. Wartung und Pflege

Beachten Sie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de).

Reinigung des Spenders

Wischen Sie den Spender mit einem sauberen Tuch ab. Nutzen Sie zur Reinigung nur Wasser, aber keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel.

Desinfizieren Sie das Spendergehäuse ggf. mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel.

Der BASIC by buchner® Universalspender kann von der Wand abgenommen und in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden (max. Temperatur: 60° C).

HINWEIS

- Das Gerät ist nicht autoklavierbar!

13. Garantie

2-jährige Herstellergarantie ab Lieferdatum.

14. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackungsabfälle gemäß der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Sämtliche Teile des Gerätes können recycelt werden.
- Bitte entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht.

Materialien:

- ABS Kunststoff
- POM Kunststoff
- Edelstahl

Hersteller:

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG
Lindenau 27
47661 Issum

Tel. 02835-180
www.ophardt.com

Vertrieb:

Buchner und Partner GmbH
Zum Kesselort 53
24149 Kiel

Tel. 0800-5999 666
www.buchner.de

1. Hinweise zur Benutzung der Anleitung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

WARNUNG

Dieses Gefahrensymbol kennzeichnet Informationen, die zur Vermeidung von Unfällen und daraus entstehenden Verletzungen beitragen können. Nichtbeachtung kann zu schweren und tödlichen Verletzungen führen.

VORSICHT

Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin. Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Geräteschäden führen.

HINWEIS

Dieses Symbol weist auf Informationen hin, die die sachgemäße Handhabung des Produktes erleichtern. Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Geräteschäden führen.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch


- Das Gerät ist für die Händedesinfektion und -reinigung unter normalen Nutzungsbedingungen vorgesehen.
- Es ist für Seifen, Handdesinfektionsmittel, Alcolgel und fließfähige Lotionen geeignet.
- Es ist nicht für den Einsatz mit hochviskosen, abrasiven oder aggressiven Produkten vorgesehen.
- Sollen nicht angegebene Füllgüter verwendet werden, kontaktieren Sie bitte den Hersteller. Details finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

3. Sicherheitshinweise

VORSICHT

- Bei Verwendung als Seifenspender das Gerät über oder in unmittelbarer Nähe eines Waschtisches anbringen. Bei Verwendung als Handdesinfektionsmittelspender kann das Gerät an jede gerade Wand montiert werden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in stark belebten Durchgangsbereichen.
- Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale beim Öffnen des Spenders leer ist.


4. Technische Zeichnung

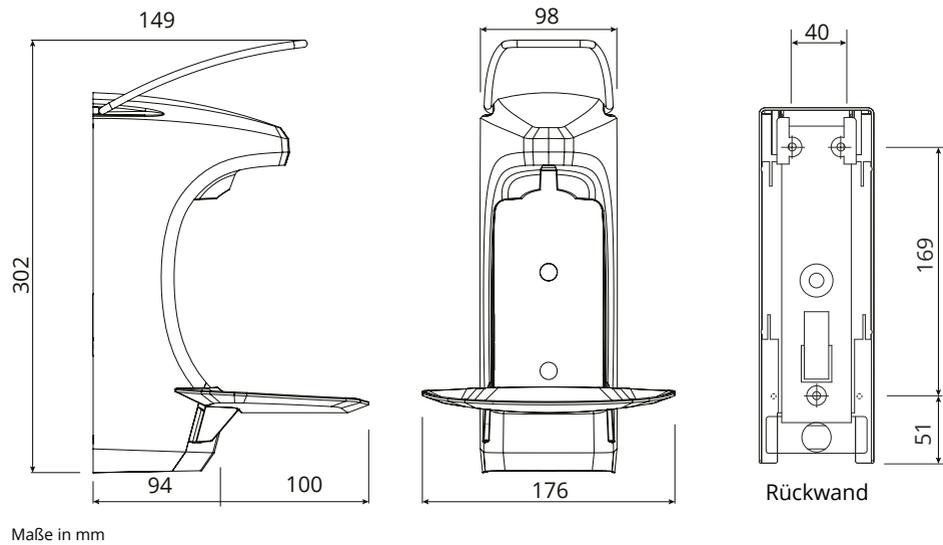

5. Lieferumfang

- Spender
- Pumpe
- Flasche
- Auffangschale
- Bedienungsanleitung
- ingo-man® Standard-Rückwand und Befestigungssatz
- Schlüssel


11. Bedienung

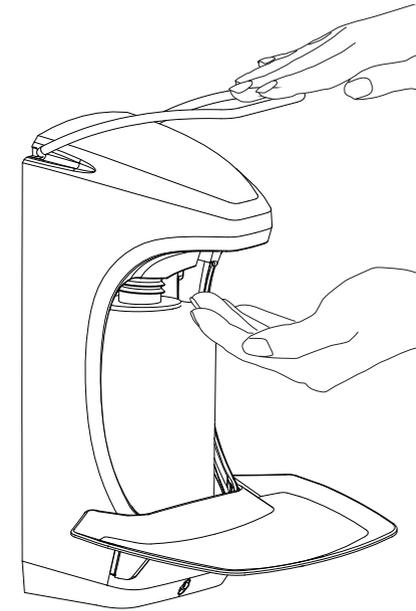

Halten Sie die Hand unter die Auslaufblende und betätigen Sie den Bedienhebel.

Bei der ersten Inbetriebnahme sowie nach dem Austausch der Pumpe oder des Behälters den Hebel einige Male bis zum Anschlag betätigen bis der Spender dosiert.

7. Montage der Auffangschale

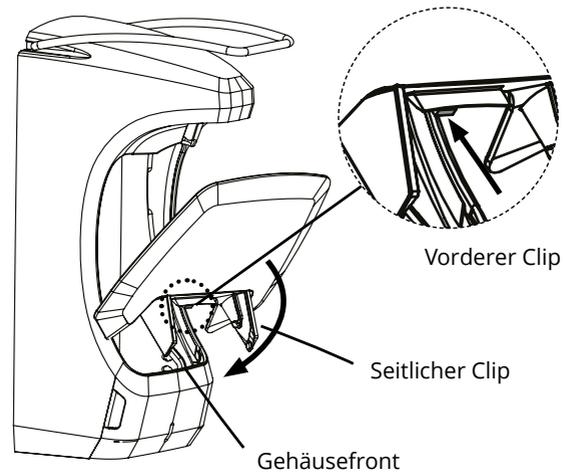

1. Den vorderen Clip der Auffangschale auf die Gehäusefront klemmen.
2. Auffangschale in leichtem Bogen nach unten führen, um die seitlichen Clips einrasten zu lassen.
3. Stößt etwas gegen die Auffangschale, löst sich diese vom Spender, um weiteren Schäden vorzubeugen. Sie kann dann einfach wieder wie beschrieben montiert werden.

8. Kompatible Pumpen und Ersatzteile

Der BASIC by buchner® Universalspender unterstützt unterschiedliche Füllgüter und ist kompatibel mit OPHARDT Hygiene Pumpen. Die Pumpen von OPHARDT Hygiene wurden entwickelt um Seifen, Handdesinfektionsmittel, Alcolgel und fließfähige Lotionen zu dosieren.

Folgende Pumpen sind mit dem BASIC by buchner® Universalspender kompatibel:

- BASIC by buchner® Einwegpumpe, 1,5 ml Hub (Best.-Nr. B21907)

Folgende Ersatzteile sind erhältlich:

- BASIC by buchner® Auffangschale (Best.-Nr. B22208)

9. Inbetriebnahme


Flascheneinsatz

HINWEIS

- Öffnen Sie den Spender nur, wenn er fest auf der Rückwand sitzt.

VORSICHT


- Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale leer ist, bevor Sie den Spender öffnen.

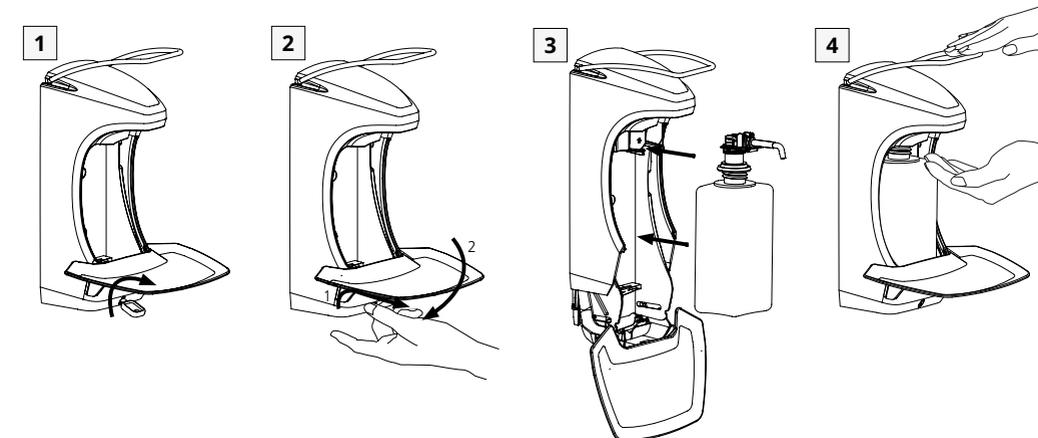

1. Stecken Sie den mitgelieferten Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen ihn um 90°. (Abb. 1)
2. Ziehen Sie die Gehäusefront leicht nach vorne, um den Spender zu öffnen. (Abb. 2)
3. Drehen Sie die Gehäusefront mit Auffangschale nach unten. Führen Sie die Flasche mit der installierten Pumpe in den Spender (Abb. 3).
4. Drehen Sie die Auffangschale und die Gehäusefront wieder nach oben und verschließen Sie den Spender durch leichten Druck gegen die Gehäusefront. Der Spender kann jetzt wieder abgeschlossen werden.

10. Einstellen des Basiswinkels

Verstellbarer Basiswinkel

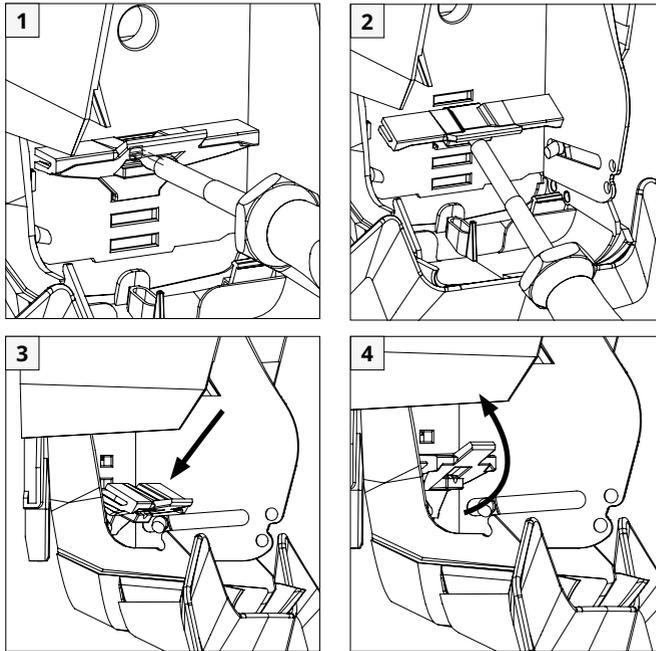

Der BASIC by buchner® Universalspender hat drei Einstellungsoptionen für den Basiswinkel.


Diese Optionen stellen die Kompatibilität für unterschiedliche Flaschengrößen sicher. (Der Schraubendreher wird nur zum Lösen des Basiswinkels benötigt.)

Einstellung des Basiswinkels:

1. Öffnen Sie den Spender.
2. Schraubendreher wie abgebildet in den verstellbaren Basiswinkel einführen (Abb. 1).
3. Drücken Sie den Schraubenzieher nach unten, so dass sich der Basiswinkel vom Gerät löst (Abb. 2).
4. Wählen Sie die neue gewünschte Position und fügen Sie den unteren Clip zuerst ein, wie in der Abbildung gezeigt (Abb. 3).
5. Verstellbaren Basiswinkel nach oben schwenken und in die Position arretieren (Abb. 3 und 4). Ein hörbares Klick-Geräusch signalisiert den festen Sitz.

6. Spendermontage

Dieser Spender muss an eine Wand montiert werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen:

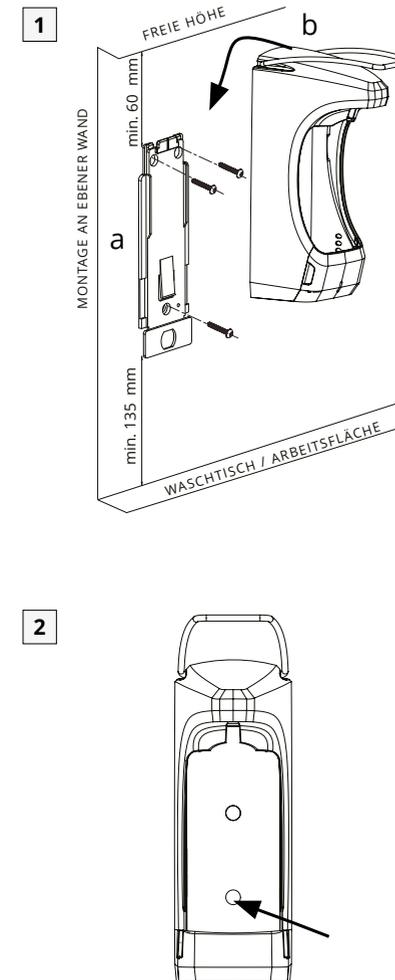

! VORSICHT

- Hängen Sie den Spender nicht in enge Eingänge oder stark belebte Durchgänge! Montagehöhe von Boden bis Unterkante Spender: 120 cm.

HINWEIS

- Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit vor der Montage!
- Berücksichtigen Sie vor der Montage, dass das Gerät für Befüllung und Betätigung gut zugänglich sein muss! Nach oben sollte ein Freiraum von min. 60 mm, nach unten min. 135 mm gegeben sein.
- Die Rückwand mit den drei mitgelieferten Schrauben an der ebenen Wand befestigen (Abb. 1 a).
- Um den Spender an der Rückwand zu befestigen, halten Sie ihn gegen die Wand und schieben ihn dann hinunter auf die Rückwand, bis die Federzunge einrastet (Abb. 1 b).
- Um den Spender von der Rückwand zu nehmen, führen Sie ein schmales Werkzeug in die vorgesehene Öffnung (Abb. 2) und drücken dadurch die Federzunge nach hinten. Der Spender kann dann nach oben herausgeschoben werden.